

optive[®]

Comfort in soluzione

Doppia azione Lubrificante ed Osmoprotettiva

La formula unica, a doppia azione, di OPTIVE[®] procura un sollievo duraturo. OPTIVE[®] lubrifica la superficie dell'occhio ed idrata le cellule della superficie oculare ripristinando il naturale equilibrio osmotico.

Descrizione:

OPTIVE[®] è una soluzione multidose sterile che contiene carbossimetilcellulosa, glicerina, levocarnitina ed eritrolo, conservata con PURITE[®] che, una volta instillato, si trasforma nei naturali componenti lacrimali dell'occhio.

OPTIVE[®] è compatibile con tutti i tipi di lenti a contatto.

Istruzioni per l'uso

Porre 1 o 2 gocce nell'occhio(i), secondo necessità.

Precauzioni

- Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno dei componenti
- Non ingerire la soluzione
- Per evitare qualsiasi contaminazione, non toccare il contagocce con alcuna superficie, ed evitare il diretto contatto con l'occhio
- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso
- Dopo 3 mesi dalla prima apertura, eliminare l'eventuale soluzione rimansta
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata in etichetta
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura ambiente
- Non utilizzare il flaconcino se il sigillo posto sul collo del flacone dovesse risultare rotto prima dell'uso
- Lasciare passare 5 minuti tra la somministrazione di prodotti oftalmici

Avvertenze

Se il problema persiste, consultare lo specialista

Presentazione

OPTIVE[®] è disponibile in flaconi di plastica contenenti 3 ml, 10 ml

Produttore:



Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlanda

Rappresentate locale:

Allergan S.p.A.
Via Salvatore Quasimodo 134/138
Roma

Importatore:

GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta 2, Segrate (Milano)

Riconfezionato nell'officina :

- Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
- Ⓓ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)

STERILE A

CE 0459