

Systeme*

GOCCE OCULARI
LUBRIFICANTI

IDRA

Descrizione

SYSTANE* IDRA Gocce Oculari Lubrificanti è una soluzione sterile contenente sodio ialuronato, polietilenglicole 400, glicole propilenico, idrossipropil guar, sorbitolo, amminometilpropanolo, acido bórico, borato di sodio, disodio EDTA, sodio citrato, potassio cloruro, sodio cloruro e POLYQUAD* (polidronio cloruro) 0,001% come conservante.

USO previsto/Indicazioni

SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti è una terapia per il trattamento dell'occhio secco in grado di conferire sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore ed irritazione provocate da secchezza oculare. SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti può essere utilizzato per lubrificare e reidratare quotidianamente lenti a contatto in silicone idrogel e morbide (idrofile) per uso prolungato e monouso.

Controindicazioni

Le persone allergiche ad uno qualsiasi dei componenti contenuti in SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti non dovranno utilizzare questo prodotto.

Avvertenze





È essenziale che lei si attenga alle istruzioni comunicate del suo specialista nonché a tutte le istruzioni riportate sulle etichette per l'uso corretto del prodotto.


Se lei dovesse avvertire una sensazione di fastidio persistente, lacrimazione eccessiva, alterazioni della vista o arrossamento dell'occhio, sospenda l'uso di SYSTANE IDRA e si rivolga al suo specialista, in quanto il problema potrebbe aggravarsi seriamente.

SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti non è indicato nell'uso come detergente o disinfettante per lenti a contatto. Non utilizzi SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti per immergervi o per disinfettare le sue lenti.

Disturbi quali l'offuscamento temporaneo della visione o di altro tipo possono pregiudicare la capacità di guidare o utilizzare macchinari. In caso di visione offuscata al momento dell'applicazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare o utilizzare qualsiasi macchinario.

Precauzioni

- Solo per uso oculare.
- Dopo aver tolto il tappo, in caso di collare a scatto della chiusura di sicurezza allentato, rimuoverlo prima di utilizzare il prodotto. [Applicabile solo a Gocce Oculari contenenti un collare a scatto]
- Per evitare contaminazioni, non mettere mai la punta del contenitore a contatto con nessuna superficie.
- Se la soluzione si scolora o si macchia, non utilizzare il prodotto.
- Rimettere il tappo dopo l'uso.
- Tenere il contenitore ben chiuso quando non è utilizzato.
- Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto. 
- CHIUSURA DI SICUREZZA: Non utilizzare in caso di sigillo di sicurezza danneggiato o mancante o tappo a prova di manomissione danneggiato. Non utilizzare se la confezione è stata aperta o danneggiata. 
- Può essere utilizzato fino a tre mesi dopo l'apertura.  Gettare la soluzione eventualmente rimasta tre mesi dopo la prima apertura.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

- Non conservare a temperature superiori a 30 °C.  -30°C
- Se ingerito, consultare il medico.

Istruzioni

- Agitare bene prima dell'uso.
- Instillare una o due gocce nell'occhio(i) secondo necessità e ammiccare.
- Mentre si indossano le lenti a contatto, in caso di lieve irritazione di minore intensità, fastidio od offuscamento, applicare 1 o 2 gocce sulla lente e ammiccare 2 o 3 volte.
- SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti può essere utilizzato secondo necessità nel corso dell'intera giornata al fine di alleviare i sintomi della secchezza oculare.

Confezioni

SYSTANE IDRA Gocce Oculari Lubrificanti viene fornito in flaconi di dimensioni comprese tra 3 mL e 10 mL.



Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, Texas, 76134 USA

EC REP

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley, Camberley

Surrey, GU16 7 SR,

Regno Unito

Importatore:

GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta 2, Segrate (Milano)

Riconfezionato nell'officina indicata con l'ultima lettera accanto al numero di lotto:

Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)

Ⓒ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)

CE 0123

STERILE A

© 2015, 2016 Novartis

Systeme* è un marchio registrato di Novartis