

BAUSCH+LOMB

Recugel®

Istruzioni per l'uso

Soluzione viscosa con dexpantenolo.

Per migliorare l'idratazione della superficie oculare e proteggere la salute degli occhi.

Che cosa è RECUGEL e che cosa contiene?

1 tubetto di RECUGEL contiene 10 g di gel oculare.

1 g di gel oculare contiene 50 mg di dexpantenolo nonché carbomer, disodio edetato, idrossido di sodio, acqua e cetrimide come agente conservante.

Quando è utile RECUGEL?


RECUGEL ha sugli occhi un effetto rinfrescante e calmante.

Migliora l'idratazione della superficie oculare in caso di sensazione di secchezza, bruciore o occhi stanchi, causati, ad esempio, dal guardare a lungo la televisione o dal lavorare a lungo davanti a un video terminale e dall'aria dei sistemi di riscaldamento o dall'aria condizionata.

RECUGEL contiene la sostanza dexpantenolo che protegge la salute degli occhi. Il dexpantenolo appartiene al gruppo della vitamina B.

Come si usa RECUGEL®?

L'illustrazione mostra la semplicità e la facilità d'uso del prodotto.

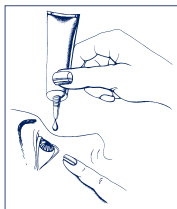

Tenere il tubetto in posizione verticale sopra l'occhio e abbassare con delicatezza la palpebra inferiore. Istillare una goccia in ciascun occhio schiacciando leggermente il tubetto. Si raccomanda di tenere il tubetto in posizione verticale durante la somministrazione.

Precauzioni

Non utilizzare se il tubetto è danneggiato.

Per prevenire eventuali contaminazioni del gel, accertarsi che la punta del tubetto non tocchi l'occhio o le dita.

Chiudere sempre accuratamente il tubetto dopo l'uso.

Si ricorda che soltanto la stessa persona deve utilizzare un tubetto di RECUGEL.

Lasciar passare almeno 15 minuti tra le singole somministrazioni se si deve usare più di un tipo di medicazione.

Recugel non va utilizzato mentre si indossano le lenti a contatto dato che potrebbe sporcare la superficie delle lenti. Pertanto le lenti vanno tolte prima dell'uso di Recugel e reindossate dopo almeno 15 minuti dalla somministrazione.

Anche se usato come indicato, questo dispositivo medico potrebbe provocare transitoria visione sfocata a causa della formazione di striature. Si raccomanda prudenza ai pazienti che devono guidare veicoli o usare macchinari.


In casi molto rari possono insorgere casi di ipersensibilità. In caso di reazioni di ipersensibilità al prodotto, non continuare a usare il preparato.

Durante la gravidanza e l'allattamento, consultare il medico prima dell'uso.



Eliminare il gel oculare residuo non utilizzato dopo sei settimane (1 mese e mezzo) dalla prima apertura del contenitore.

STERILE A

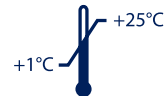

Non utilizzare il tubetto se è danneggiato.



Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin



Importatore:

GMM Farma S.r.l. - via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)

Riconfezionato nell'officina indicata con l'ultima lettera accanto al numero di lotto:

Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. Via E. Strobino, 55/57
59100 Prato (PO)

Ⓔ Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto
Fiorentino (FI)