

Systeme™

COLLIRIO LUBRIFICANTE

Si prega di leggere attentamente il presente foglio illustrativo e di conservarlo per l'uso futuro.

DESCRIZIONE:

SYSTEME™ Collirio Lubrificante è una soluzione sterile contenente polietilenglicole 400, glicole propileno, IDROSSIPROPIL GUAR, acido bórico, calcio cloruro, magnesio cloruro, potassio cloruro, sodio cloruro, zinco cloruro e POLYQUAD™ (polidronio cloruro) 0,001% come conservanti.

USI (indicazioni)

SYSTEME™ Collirio Lubrificante è un trattamento per l'occhio secco che dà un sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore e irritazione causate da secchezza oculare.

CONTROINDICAZIONI (Motivi per non usare il prodotto):

Le persone allergiche ad uno o più dei componenti contenuti in **SYSTEME™ Collirio Lubrificante** non devono usare questo prodotto.

ISTRUZIONI:

SYSTEME™ Collirio Lubrificante può essere usato secondo necessità durante l'intera giornata. Può essere utilizzato per trattare l'occhio secco associato all'utilizzo di lenti a contatto, instillando le gocce prima dell'applicazione e dopo la rimozione delle lenti a contatto. Instillare 1-2 gocce nell'occhio (i) affetto(i) al bisogno e aprire e chiudere le palpebre.






AVVERTENZE:

È di essenziale importanza attenersi alle istruzioni del proprio specialista e a tutte le istruzioni fornite sulle etichette per l'uso corretto del prodotto. Se si ha una sensazione di fastidio persistente, lacrimazione eccessiva, disturbi della visione o rossore agli occhi, interrompere l'utilizzo di **SYSTEME™ Collirio Lubrificante** e consultare il proprio specialista, in quanto il problema potrebbe diventare più grave.

Disturbi quali l'offuscamento temporaneo della visione o di altro tipo possono alterare la capacità di guidare o utilizzare macchinari. In caso di visione offuscata dopo l'applicazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare o utilizzare qualsiasi macchinario.

PRECAUZIONI:

- Per evitare contaminazioni non mettere mai la punta del flacone contagocce a contatto con nessuna superficie.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Solo per uso oculare.
- Dopo aver tolto il tappo, se l'anello di sicurezza si è allentato rimuoverlo prima di utilizzare il prodotto.
- Contattare un medico in caso di ingestione.
- Non usare il prodotto se la soluzione cambia colore o diventa torbida.

- ANELLO DI SICUREZZA: Non usare in caso di sigillo di sicurezza danneggiato o mancante o cappuccio di sicurezza danneggiato. Non usare se la confezione è stata aperta o danneggiata. 
- Rimettere il tappo dopo l'uso.
- Conservare a temperatura ambiente tra 15 e 30 °C. 
- Tenere il flacone ben chiuso quando non è utilizzato.
- Utilizzare entro la data di scadenza indicata sul prodotto. 
- Gettare via la soluzione eventualmente rimasta dopo sei mesi dalla prima apertura del flacone. 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

CONFEZIONI:

SYSTANE™ Collirio Lubrificante, sterilizzato per mezzo di una combinazione di sterilizzazione a vapore e filtrazione, è fornito in flaconi di plastica contenenti 3 ml o 10 ml.

STERILE A



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, USA 76134 - 2099

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

DISTRIBUTORE:

GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI)

RICONFEZIONATO NELL'OFFICINA INDICATA CON L'ULTIMA LETTERA ACCANTO AL NUMERO DI LOTTO:

- Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
- Ⓣ Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

CE0123

© 2018 Alcon Inc.